



美國天籟UP-64K充電式助聽器

產品特色及功能

- 本產品為充電式設計免電池耗材，可用變壓器、三號電池兩種充電方式。
- 充滿電狀態下約可連續使用10小時。
- 六段音量調整旋鈕，音量輸出標準：50±5dB聲音響度十足。
- 設有10秒延遲開機功能，有效抑制裝著時的嘯叫現象。
- 具備噪音抑制功能(NF)，可於吵雜環境中有效降低不適感。
- 內建最大音壓抑制功能，可保護您的耳朵不會因突然增加的異常音量而受到損傷。
- 附各式尺寸耳塞組，請依耳道大小選擇使用。
- 左右耳適用款。


※ 注意：如果有聽損問題者，建議尋求專業醫師協助，先了解自身的聽力狀況，排除病理問題後再行配戴為佳。

配件一覽

- ① 充電盒
- ② 變壓器
- ③ AA三號電池
- ④ 助聽器
- ⑤ 耳塞組
- ⑥ 清潔刷



各部功能

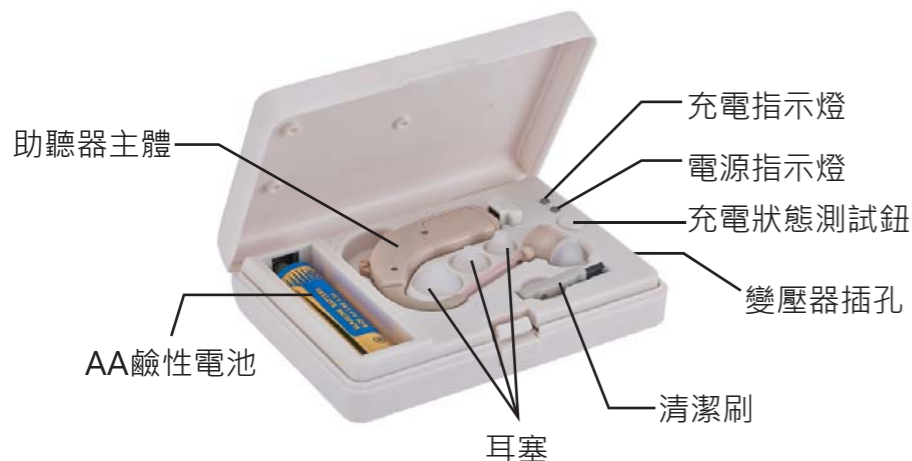


如何充電

※ 初次使用請充8小時以上，以確保電源電量充足。

電池充電

1. 將助聽器置入充電槽，並將AA三號電池放入電池槽中。
2. 按壓充電狀態測試鈕，觀察「上方的充電指示燈」。
3. 亮綠色：正常充電中
沒亮燈：充電完成(滿電)
4. 使用電池充電時請充滿7個小時以上。

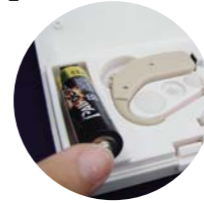

變壓器充電

1. 將助聽器置入充電槽，將變壓器接上電源後插入充電盒。
2. 按壓充電狀態測試鈕，觀察「上方的充電指示燈」。
3. 亮綠色：正常充電中
沒亮燈：充電完成(滿電)
4. 使用變壓器充電時請充滿5個小時以上。



充電盒指示燈

按下充電狀態測試鈕後...

充電指示燈(上方)


亮綠色	正常充電中
沒亮燈	充電完成(助聽器滿電)

電源指示燈(下方)

亮綠燈	電力供應正常
亮紅燈	電池電力不足 (請更換新電池)
沒亮燈	無電力輸入 (請檢查變壓器是否妥善置入充電盒插孔)

※ 充電相關問題，請聯繫元健大和維修中心 (02) 8665-8227

配戴方式

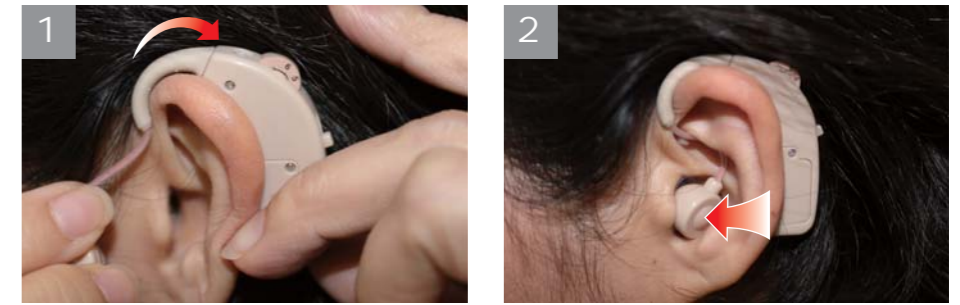

將助聽器的耳勾掛在耳朵根部上

將喇叭放入耳道



開啟電源 (約10秒後啟動)

調整音量至舒適程度

※ 注意：欲取下助聽器時，請雙指捏取耳道內的喇叭為施力點，再輕輕取下。請勿直接拉扯耳機線，會造成非保固的斷裂損壞。

喇叭請完全塞入耳道中使用，避免喇叭對到麥克風產生回授嘯叫。如果嘯叫聲無法去除時，請換合適尺寸的耳塞來防堵漏音，避免喇叭對到麥克風而產生回授嘯叫現象。

本產品開機前10秒設有延遲開機功能，開機前10秒內不會發出任何聲音，可降低裝著助聽器時發生嘯叫所引起的不適感。

※ 配戴相關問題，請聯繫元健大和維修中心 (02) 8665-8227

使用前後注意事項



每次使用前請先清理耳道

使用後需用小刷子將耳塞周圍之耳垢清除，務必使耳塞上的小孔暢通，以維長期正常運作；耳垢的堵塞可能會影響到助聽器的效果。