

Mimitakara® JAPAN

日本耳寶UP-6B51耳掛式輔聽器

產品特色及功能

- 日本耳寶UP-6B51耳掛式輔聽器榮獲歐、美、日市場好評，提供使用者高品質的聲音擴大功能。可使周圍的聲音變大聲且清楚，讓您輕鬆愉悅地與人交談。
- 高音質處理電路，音質清晰如原音，長時間配戴不易感到疲倦。
- 本產品適用於：欲享有高音質之音樂(聲)、與人交談或夜晚觀看電視、聆聽遠方蟲鳴鳥叫、聽演講等。
- 內建音量調整旋鈕，可依個人不同場合需求隨時調整音量大小。
- 內建最大音壓抑制功能，可保護您的耳朵不會因突然增加的異常音量而受到損傷。
- 內附大小兩種耳塞，請依耳道大小選擇耳塞。
- 耳塞內建耳垢防止結構，可防止耳垢或耳水傷害輔聽器本體。
- 左右耳適用款，輕量袖珍不顯眼且具有時尚感。
- 提供一年主體保固服務。攜帶盒、耳塞及電池等附屬品不在保固範圍。
- 附大字體說明書。

保存/保養方法

保存方法

- 勿放在高溫、高溼度及充滿灰塵和有害氣體的環境中。
- 以通風良好和陽光充足處為主。

保養方法

- 耳塞弄髒時請從本體取出後以清水或中性清潔劑清洗（本體不能水洗）清洗後，請將水氣拭乾後再使用。

隨機配件

產品內容：

輔聽器本體 x1

收納盒 x1

LR44或PR44電池 x1


大/小 耳塞 各1



各部位名稱




工作原理

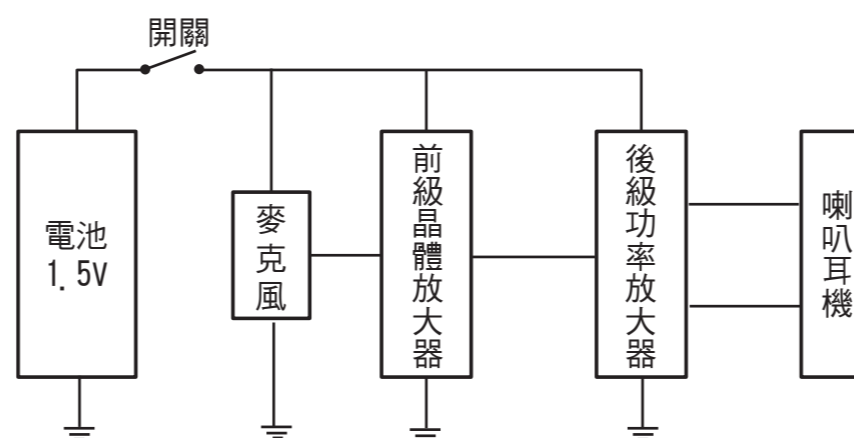

使用方法

- 1、撥開電池盒的突起處，放入電池
- 2、請選擇適合耳洞大小的耳塞
- 3、將輔聽器裝上耳塞並將耳機放入耳內(如圖1)
- 4、將輔聽器的耳管服貼耳廓放置，輔聽器即可固定於耳後(如圖2)
- 5、請打開電源開關
- 6、將音量調整至適合的音量大小

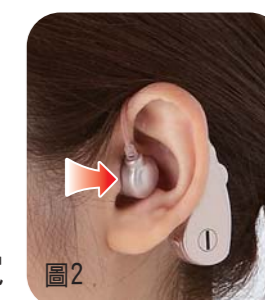

注意：

- 使用後務必將電源開關關掉以免耗電
- 電池的正、負極放錯會造成無法使用
- 最大音量也無法聽到時，請更換新的電池
- 請勿讓輔聽器受到強烈衝擊
- 附屬的電池為測試用電池，請提早更換新電池

※請注意：本產品不適用於聽覺障礙者。

產品規格

品名：Mimitakara日本耳寶耳掛式輔聽器

產品型號：UP-6B51

最大增益音量：29±5dB

標準頻率：800~1600Hz

電池規格：LR44 (鹼性圓形電池) / PR44 (鋅空氣電池)

建議使用PR44 (鋅空氣電池) 使用時間較長

電池壽命：LR44 (鹼性圓電池) 約10天

PR44 (鋅空氣電池) 約1個月 (1天使用6小時)

尺寸 / 重量：約20×105×14mm / 約8g

材質：本體 ABS樹脂 / 耳塞 矽膠 / 攜帶盒 ABS樹脂

內容物：輔聽器乙隻 / 耳塞2個 / 攜帶收納盒乙個