

美國天籟充電式助聽器 物件清單



- ① 充電盒 ② 助聽器主體(左耳、右耳 各1)
 ③ 1.5V AA (UM-3) 鹼性電池1顆 ④ 變壓器 ⑤ 清潔刷
 ⑥ 耳塞(大、中、小、極小 各4)※助聽器出廠時預先裝配中尺寸耳塞

各部功能名稱

■ 充電盒



■ 助聽器本體




如何配戴助聽器




將助聽器自充電盒取出，開啟電源



依個人需求調整適合音量

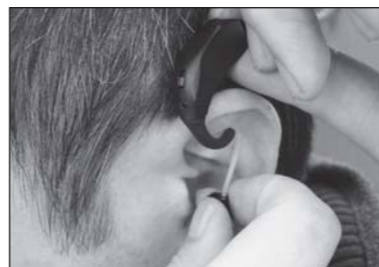

將耳塞放入耳朵內

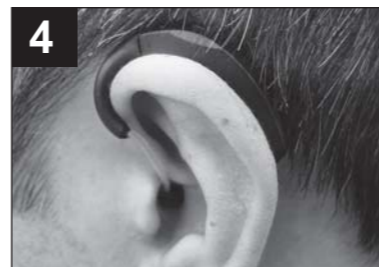

依照舒適度調整配戴位置及選用尺寸合適的耳塞

如何調整音量



旋轉音量調節鈕調整音量
 音量標示Lo(低)~ Hi(高), Lo表示低音量, Hi表示高音量, 請依照個人需求調整最適合音量。

如何充電

※注意: 助聽器本體的開關要處於"開"的狀態才能充電。

※充電8小時以上時, 無論充電指示燈 ① ② 是否熄滅, 助聽器都已將近充電完成, 可使用12小時以上。長時間不使用請關機(請將助聽器開關切換到"關"的位置)。

■ 變壓器充電

1. 先將變壓器接上充電盒, 並插上家用插座, 再將助聽器電源開啟後置入充電槽充電。



充電指示燈 ① 充電指示燈 ②
 電源指示燈 ③

2. 按壓充電狀態測試鈕, 觀察充電指示燈 ① ② 與電源指示燈 ③ 是否為"綠燈", 即表示正常供電中。

■ 電池充電

1. 將鹼性電池放到電池座中, 再將助聽器電源開啟後置入充電槽充電。



充電指示燈 ① 充電指示燈 ②
 電源指示燈 ③

2. 按壓充電狀態測試鈕, 觀察充電指示燈 ① ② 與電源指示燈 ③ 是否為"綠燈", 即表示正常供電中。

按下充電狀態測試鈕指示燈狀態顯示



※未裝置電池或使用適配器充電時, 此時按壓測試鈕電源指示燈及充電指示燈皆熄滅。

充電指示燈 ① 充電指示燈 ②
 電源指示燈 ③

充電指示燈 ① ②	亮綠燈	正常充電中
	熄滅	充電完成或助聽器未開啟電源或主體安裝錯誤
電源指示燈 ③	亮綠燈	鹼性電池或適配器電力供應正常
	亮紅燈	電力供應異常, 立即換新鹼性電池或使用適配器
	熄滅	

⚠ 重要須知

- 為了延長充電電池的使用壽命, 長時間不使用時, 請先將助聽器電池充飽後再關閉電源, 避免電力自然損耗。
- 使用前先以棉花棒清潔您的耳垢。如果耳垢阻塞了耳塞孔, 將會影響收音品質。
- 本產品內建充電電池, 在正常適當的情況下使用時, 此充電電池能充放電的次數高達300次以上。
- 根據充電電池的特性, 在電池電量不足時, 音量會較平時微弱; 此現象並非功能損壞, 此時您只要利用變壓器或鹼性電池進行充電即可。
- 請勿讓嬰兒或沒有自主能力的人使用此產品。
- 請根據此說明書來操作及保存此產品。
- 在下列情況請勿使用助聽器: 使用手機時、睡覺、洗澡、洗頭、洗臉及游泳等會碰到水的情況, 或是劇烈的運動時。

產品送修前的注意事項

將助聽器送回維修前, 請依以下項目自行檢視, 若未改善, 請聯絡客服中心。

- (1) 檢查電源是否打開。
- (2) 耳垢是否阻塞了耳塞: 請用配備中的清潔耳刷來清理耳塞。
- (3) 電池的電力是否已耗盡: 請更換新的電池來充電或使用適配器充電。
- (4) 建議可定期到醫院檢查聽力, 是否聽力有變差。

產品規格

產品名稱: 美國天籟充電式助聽器
 產品功能: 幫助聽力受損的人彌補受損的聽力
 標準頻率: 2500Hz
 最大音量輸出標準: 50 ± 5dB
 電池型式: 內建專用充電電池2顆
 可充放次數: 300次以上(數值根據使用的音量大小而有所差異)
 產品使用: 每充電一次約可連續使用12~16小時(滿電的狀況)
 產品使用的環境溫度及濕度: +10°C ~ +40°C, 30% ~ 85% RH
 產品尺寸: 【耳機主體】約36 (L) x 15 (W) x 10 (H) mm
 【充電盒】約96 (L) x 66 (W) x 22 (H) mm
 產品重量: 【耳機主體】6.0g (含充電電池) / 【充電盒】62.5g
 產品材質: 【耳機主體】【充電盒】【變壓器】ABS / 【耳塞】矽膠